

Технология Мини-Молд.

Набор Мини-Молд включает: 18 колпачков, по 3 каждого типа и 2 держателя.



Мини брекеты

(баночка с чёрной крышкой)

Создаёт стандартный брекет, идеально для минимальной нагрузки на зубы.



Контроль вредных привычек

(баночка с зелёной крышкой)

Позволяет создать небольшое клиническое остриё препятствующее прикладыванию языка и сосанию пальца.



Изготовление кнопки

(баночка с белой крышкой)

Создаёт функциональную кнопку малого размера.



Приклеивание дуги

(баночки с синей и прозрачной крышками)

Идеально подходит для прямой фиксации лингвального ретейнера. (в наборе большая и малая форма)



Накусочная площадка

(баночка с красной крышкой)

Создаёт открытый прикус, т.е. накусочную площадку на лингвальной поверхности верхних резцов.



Простая 2-х ступенчатая технология



Подготовьте зуб и нанесите праймер так же как обычно перед фиксацией брекетов.

Установите резиновый колпачок необходимой Вам формы в держатель. Заполните колпачок све-

тоотверждаемым материалом.



Поместите колпачок на требуемый зуб, прижмите к поверхности и посветите лампой (от 5 до 20 секунд в зависимости от свойств Вашего светоотверждаемого материала)

Продукция зарегистрирована в РФ и имеет сертификаты соответствия.

Эксклюзивный дилер в России – фирма «ФОРТЕКС-Т»



+7 (495) 966-03-04
www.pumpagroup.ru